






KORTBRUKSANVISNING (OBS! Vid eventuella tveksamheter hänvisar vi till användarmanualen.)

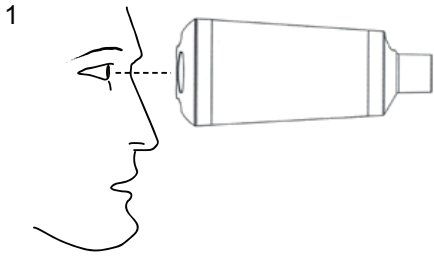


Kontrollera produkten noggrant före användning för att säkerställa att den är korrekt monterad och att det inte förekommer föremål som inte hör till andningsbehållaren eller att det saknas delar. Ta även bort ev. delar som inte hör till andningsbehållaren före användning.

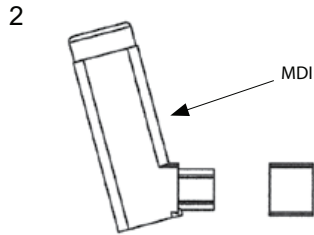


Läs bruksanvisningen som medföljer sprayinhalatorn före användning. Ta bort locket från sprayinhalatorn.

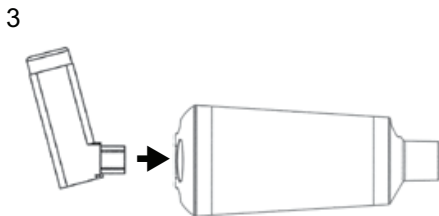


För in sprayinhalatorn (MDI) i botten av L'espace andningsbehållare.

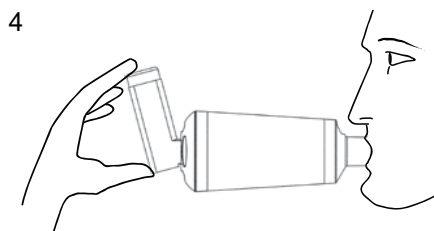

Placera munstycket i munnen och håll det mellan läpparna.

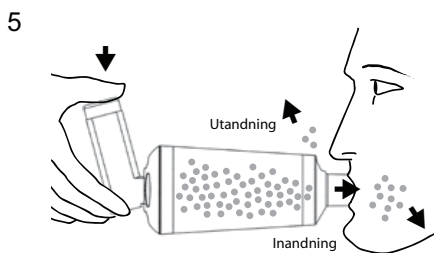

Tryck en gång på sprayinhalatorn och inhalera långsamt genom munnen. Håll kvar munstycket i munnen, se till att läpparna sluter tätt runt munstycket och andas in djupt minst tre gånger. Den utandade luften strömmar ut genom utandningsventilen.

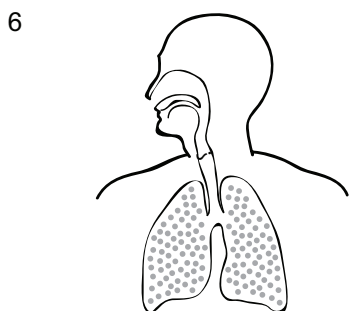

Vänta i 30 sekunder innan en ny dos av läkemedel administreras (upprepa steg 4 och 5) eller följ läkarens anvisningar. Administrera endast en puff av läkemedel åt gången. Följ läkarens doseringsanvisningar.

L'espace


med munstycke



RENGÖRINGSANVISNING (OBS! Vid eventuella tveksamheter hänvisar vi till användarmanualen.)


Rengör produkten enligt följande anvisningar före den första användningen och därefter minst en gång i veckan.

A

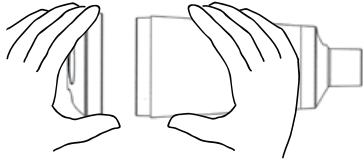

Ta bort botten (ta inte bort munstycket).


B

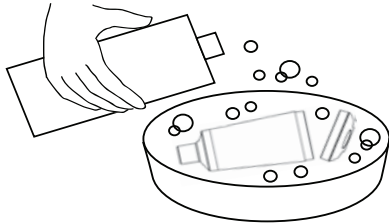

Låt alla delarna ligga i blöt 15 minuter i ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.


Rör försiktigt runt delarna i vattnet.

C

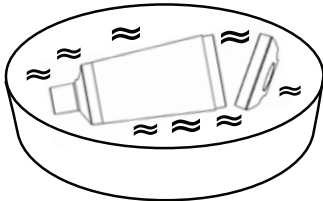

Skölj sedan delarna med rent vatten.

D

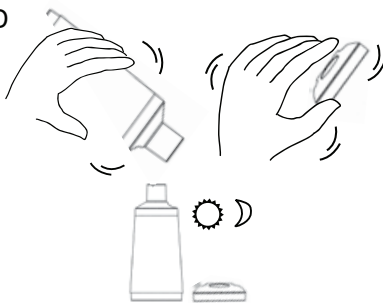


Skaka av vattnet enligt figuren och låt lufttorka.

Obs! Använd inte trasor för att torka delarna.

Försäkra dig om att alla delarna är helt torra innan de återmonteras.

E

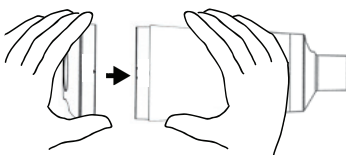

Sätt tillbaka botten när delarna är helt torra och klara för användning.

* L'espace andningsbehållare kan kokas eller diskas i maskin vid behov av en grundligare rengöring.